

### **Правила ухода:**

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



### **Состав изделия:**

67% нейлон, 23% эластик, 10% лайкра.

### **Условия хранения:**

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### **Условия утилизации:**

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

### **Срок годности:**

Срок годности не установлен. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом

лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельного изменения конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

### **Комплектность:**

Ортопедическое изделие арт. EKN-212, инструкция по применению.

### **Гарантийный срок:**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации бандажа.

### **Гарантийными случаями не являются:**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  
РУ № ФСЗ 2011/09550 от 12.04.2011 г.  
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00210 от 15.04.2011 г.

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ,  
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60

Арт. INTOK-EKN-212-N4\_02/12



Medical Line



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



## Инструкция по применению ортопедических изделий



**Бандаж на коленный сустав  
EKN-212**

### Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett на колено, эластичный, с фиксирующей подушкой и металлическими спиральными ребрами жесткости, арт. EKN-212 фиксирует коленный сустав в период воспалительного заболевания, при острой травме или после оперативного лечения.

Вставка в области колена фиксирует и защищает коленную чашечку.

Бандаж Orlett, арт. EKN-212 способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

За счет наличия спиральных ребер жесткости бандаж снижает ударные нагрузки на коленный сустав при ходьбе.

### Показания к применению:

- ушибы и растяжения связок коленного сустава;
- вывихи надколенника (коленной чашечки);
- хронические воспалительные заболевания надколенника (коленной чашечки) и коленного сустава (хондромалиция надколенника, деформирующий артроз);
- реабилитация после травм надколенника (коленной чашечки) и коленного сустава;
- предупреждение вывихов надколенника (коленной чашечки);
- профилактика травм коленного сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав.

### Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач. Для профилактики травматизма и обострения заболеваний рекомендованный режим: при дополнительных нагрузках на коленный сустав.

### Противопоказания:

Противопоказаний для использования бандажа не выявлено.

### Предупреждения:

- людям, имеющим заболевания кожи перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

### Инструкция по применению

#### Конструкция бандажа:

1. Выполнен из медицинского эластичного трикотажа с высоким содержанием лайкры.
2. Усилен двумя металлическими спиральными ребрами жесткости.
3. Усилен силиконовой вставкой тороидальной формы для дополнительной фиксации и защиты.



Рис. 1

#### Порядок надевания:

Бандаж надеть непосредственно на коленный сустав. При надевании необходимо совместить вставку на передней поверхности бандажа с коленной чашечкой.

#### Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность коленного сустава по середине коленной чашечки. Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

#### Таблица подбора размеров:

Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.